

	CPAP FLOW-SAVE	PROCÉDURE NR4
	Versie : 1	Datum : 22/01/2019

1. Beschrijving van het materiaal en de indicaties

Ademhalingshulpmiddel voor bewuste patiënten die spontaan ademen.

Het is een open systeem, waarbij de druk wordt gegenereerd door een virtuele klep die de snelheid van de gasen die de micro canaliculen passeren, omzet in druk.



Indicaties:

- Congestief hartfalen
- Pulmonaal oedeem - Bijna verdrinking
- Asthma - chemische contaminatie
- COPD

Contra-indicaties:

- cardiaal arrest
- gebrek aan medewerking
- bewustzijnsstoornis
- maagbloeding
- slikstoornissen
- aangezichtstrauma
- toestand van asfyxie
- claustrofobe patiënt
- braken en secreten

Voordelen:

- gebruiksvriendelijk
- Weinig plaatsinnemend
- Open systeem dat toelaat met de patiënt te communiceren hetgeen bijdraagt tot vermindering van stress
- Vermindering van ademhalingsarbeid dankzij de aanwezigheid van de inerte virtuele (lucht) klep

**Het Flow-save systeem laat gelijktijdige toediening van aerosol door middel van aangepast verbinding toe.
Goede fitmaskers met maten S-M-L**

	CPAP Flow-save	PROCÉDURE NR4
	Versie : 1	Datum : 22/01/2019

AANBEVELINGEN

- ! Observatie van de parameters: BD, pols, O₂,....