


Medumat Standard A


Ademfrequentie (AF) :

Stel de ademfrequentie in met de instelknop beademingsfrequentie.

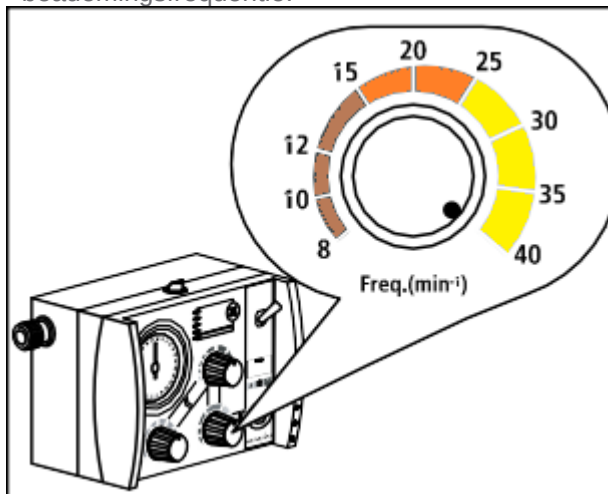


Ademminutenvolume (MV) :

Stel het ademminutenvolume in met de instelknop minutenvolume.

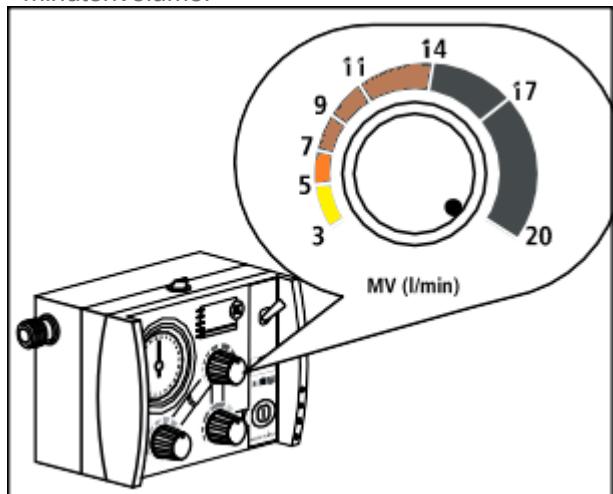

Maximale beademingsdruk (P max) :

Stel de beademingsdruk in met de instelknop beademingsdruk

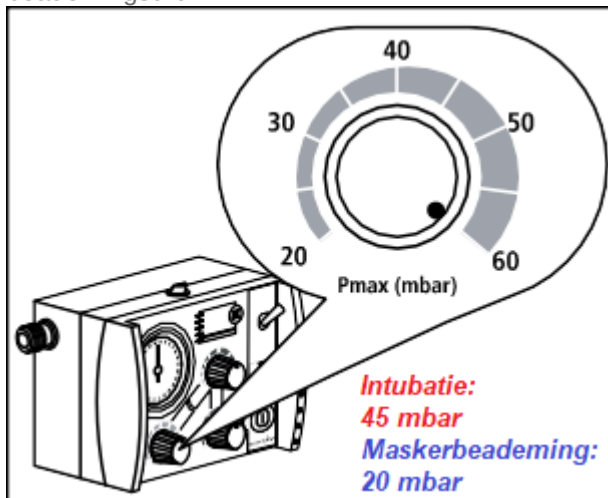

Advies bij gecontroleerde beademing:

	Klein kind GEEL	Kind ORANJE	Volwassene BRUIN
Gewicht KG	10 - 30 kg	30 - 60 kg	60 - 110 kg
Ademfreq. AF	25 - 40	15 - 25	8 - 15
Adem MV MV	3 - 5 l/min	5 - 7 l/min	7 - 13 l/min

